

Masque FFP2 made in EU - EN 149:2001+A1:2009

Reference: P9150

Masque jetable FFP2 à usage unique conforme à la norme EN149:2001 + A1:2009. Date d'expiration à +/- 3 ans. Vos masques seront livrés emballés individuellement et vendu par boîte de 20 avec notice. Fabrication Européenne.

Notre **masque FFP2** est conforme à la norme EN149: 2001 + A1:2009 et approuvé selon le règlement UE 2016/425.

Masque filtrant à usage unique, destiné à protéger le porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes. Le masque FFP2 est composé d'une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d'un dispositif de filtration : il couvre nez, bouche et menton.

Sa durée de protection est de 8 heures. Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.

Il doit être changé immédiatement en dehors de la présence du patient, chaque fois qu'il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.

Le port de masques FFP2 est préconisé pour le grand public (banque, commerce, agroalimentaire, esthétique...) , mais également le personnel médical et soignant. Il est aussi destiné aux salariés potentiellement soumis à des inhalations et particules chimiques : peinture, garages, laboratoires, chimie, usines ...

Information importante concernant notre masque FFP2 :

Notre masque FFP2 est conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 et approuvé selon le règlement UE 2016/425.

Composition :

Le masque filtrant pour protéger contre les particules de type FFP2 NR, est constitué de 5 couches qui sont :

1. 50g Tissu non tissé spunbond;
2. 25g Tissu meltblown;
3. 50g Coton;
4. 25g Tissu meltblown;
5. 30g Tissu non tissé spunbond.

Pour un bon maintien, ce masque jetable FP2 a été conçu avec deux bandes élastiques pour la fixation, une pince adaptative pour le nez et un ajusteur crânien blanc.

Masque FFP2 efficace contre les nouveaux variants du coronavirus.

Conformément aux dernières recommandations faites par le Gouvernement, les masques FFP2 sont plus efficaces contre les nouveaux variants que les masques artisanaux. Ce modèle de masque FFP2 ayant une capacité de filtration bactérienne de 95%, il est conforme aux recommandations du Gouvernement.

Modèle masque FFP2 également disponible en noir.

Poids unitaire : 3 g

Conseils d'utilisation : Comment porter un masque FFP2 ?

1. Lavez vous correctement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique. 2. Placez votre masque en le tenant par les élastiques, et placez ces derniers derrière vos oreilles. 3. Assurez-vous que votre masque FFP2 recouvre bien votre nez, votre bouche et votre menton. 4. Ajustez votre masque FFP2 grâce à sa barrette nasale. 5. Une fois placé, ne touchez plus votre masque. 6. Avant de le retirer, lavez-vous une nouvelle fois les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. 7. Jetez votre masque dans une poubelle fermée.

Entretien du produit : Les instructions de stockage suivantes s'appliquent au produit emballé : Température ambiante: -20°C à +40°C / Humidité relative: jusqu'à un maximum de 80% / Tenir à l'écart de la saleté, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Les masques usagés doivent être éliminés en tant que déchets à risques, si possible conformément aux réglementations locales.

Taille : Taille unique

Couleurs : Blanc

Code douanier : 6307909810

Quantité par sous-carton : 20

Longueur : 21 cm

Largeur : 15.5 cm

Pays de fabrication : Bulgarie

Type de conditionnement individuel : Sachet plastique transparent

Composition : 5 Couches : 50% T.N.T. (2 Couches) + 50% Meltblown (3 Couches)

Filtration BFE (Barrier Filtration Efficiency) : 95 %

Normes et certificats : EN 149: 2001 + A1: 2009

Dimensions des produits : Vendu par boîte de 20 unités.

Carton de 24 boîtes. 40 boîtes par carton.

Code EAN : 6307909811

Quantité par carton : 1000

Largeur carton : 28.5 cm

Longueur carton : 58 cm

Hauteur carton : 67 cm

Poids carton : 11.2 kg



Couleur: Blanc

